

**PULMANOVA®basic**, allergendichter Matratzenbezug aus  
70 % Polyester, 30 % Polyamid

Medi-Tech hat ein Auge auf Ihren Schlaf. Wir haben  
uns auf Produkte spezialisiert, die stets Gesundheit mit  
Komfort verbinden. So schlafen Sie mit Sicherheit gut.  
Und der Tag kann kommen! Mehr über uns und unsere  
Produkte: [www.meditech-muenster.de](http://www.meditech-muenster.de)



Großhandel für medizin-technische Produkte GmbH

Weseler Straße 675 E  
48163 Münster  
T 0251 871366-0  
F 0251 871366-14  
[info@meditech-muenster.de](mailto:info@meditech-muenster.de)  
[www.meditech-muenster.de](http://www.meditech-muenster.de)

So komfortabel kann  
gesundes Schlafen sein:

## PULMANOVA®basic Encasings



**PULMANOVA®basic**, allergendichter Zwischenbezug für Kissen  
und Decken aus 100 % Polypropylen (Materialprobe 1x gewaschen)

Guten Morgen: Medi-Tech

Guten Morgen: 



## Qualität, die man fühlt. Schutz, der wirkt.

Sicher haben Sie es schon beim ersten Anfassen bemerkt: Das spezielle Material, aus dem wir die Zwischenbezüge **PULMANOVA®basic** fertigen, fühlt sich äußerst anschmiegsam und angenehm an. Schließlich wollen wir, dass Sie nicht nur höchst allergensicher schlafen, sondern auch besonders bequem. Deshalb bieten Ihnen unsere Zwischenbezüge im Vergleich zu anderen ein Plus an Komfort. **PULMANOVA®basic** ist:

- Extrem luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, damit Sie weniger schwitzen
- Weich und anschmiegsam nach der Wäsche, ganz ohne Rascheln oder Knittern
- Besonders leicht, so dass Sie die Decke kaum spüren
- Höchst strapazierfähig – gerade der Matratzenbezug hält vielfachen Beanspruchungen stand




Allergiker-  
geeignet  
www.tuv.com  
ID: 000020880



## Faszinierende Technik für gesunden Schlaf

**PULMANOVA®basic** schützt Sie im Schlaf vor Allergenen und Feinstaub. Zuverlässig und komfortabel. Viele herkömmliche Allergiebezüge funktionieren wie eine Gummimatte: sie blockieren neben den Allergenen auch Luft und Feuchtigkeit. Anders **PULMANOVA®basic**: Das speziell entwickelte Dreischichten-Vlies stoppt selbst mikroskopisch kleine Partikel, sperrt Allergene rigoros aus, lässt aber Luft und Feuchtigkeit zirkulieren. Ein Grund, warum selbst Babys und Kleinkinder in unseren Zwischenbezügen gut und sicher schlafen.

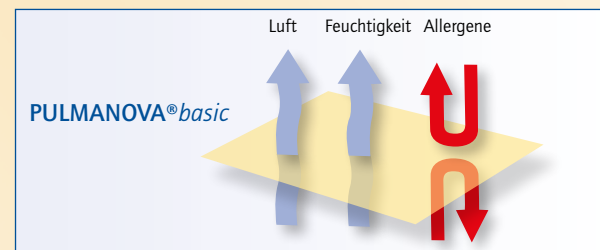

## So einfach ist die Anwendung

Die **PULMANOVA®basic** Bezüge für Bettdecken, Kissen und Matratzen ziehen Sie einfach unter Ihre normale Bettwäsche. Bei allen Kissen-, Decken- und Matratzenbezügen sorgen breite Innenlaschen hinter dem Reißverschluss für eine zuverlässige Allergensperre, die auch hier besonders wichtig ist. Damit Sie die Matratze noch leichter beziehen können, verfügt der Matratzenbezug über einen zweiseitigen Reißverschluss. Für den optimalen Schutz sollten alle Betten eines Raumes mit allergendichten Zwischenbezügen ausgestattet sein!

## Beste Pflegeeigenschaften

**PULMANOVA®basic** Encasings sind pflegeleicht. Um optimalen Allergieschutz zu gewährleisten, müssen sie nur vierteljährlich gewaschen werden. Sie können die Zwischenbezüge im Wäschetrockner bei geringer Trommelfüllung und niedriger Temperatur trocknen. Bitte beachten Sie unsere Pflegeanleitung. Die Encasings bitte vor dem Gebrauch waschen. Das Material wird dadurch erheblich weicher.

|                              |     |  |  |  |  |
|------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Kissen- und<br>Deckenbezüge: | 60° |  |  |  |  |
| Matratzenbezug:              | 95° |  |  |  |  |

## Qualität made in Germany

**PULMANOVA®basic** wird als Qualitätsprodukt in Deutschland gefertigt. In vielfachen unabhängigen Tests hat es seine hohe Qualität bewiesen. Deshalb gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren bei sachgemäßer Behandlung und Pflege.

Für die Reise und für spezielle Anforderungen finden Sie in unserem Sortiment außerdem:

- **PULMANOVA®** Schlafsack und **MEDI-TECH** Reiselaken für komfortablen Allergieschutz unterwegs.
- **PULMANOVA® Neurodermitis-Overall** für Kinder, weich, anschmiegsam und leicht.

Alles auch zu sehen unter:  
[www.meditech-muenster.de](http://www.meditech-muenster.de)