

Sicherheitshinweise

- Bitte benutzen Sie, falls erforderlich zum Ein- und Aussteigen sowie Waschen und Duschen eine Hilfsperson, sofern Sie sich selbst nicht ausreichend halten können.
- Achtung Klemmgefahr! Beim Einstellen der Breite und Drehen des Sitzes.
- Achten Sie auf den korrekten Sitz der Auflagegummis auf dem Wannenrand (die Gummis müssen Komplett aufliegen). Dadurch wird gewährleistet, dass der Sitz nicht vom Wannenrand in die Wanne abrutschen kann.
- Der Badewannendrehstuhl ist ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck und von einer Person zu benutzen.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen.

Wartung

Der Badewannendrehstuhl Bano ist wartungsfrei. Sollte der Sitz defekte aufweisen wenden Sie sich an den Fachhändler oder Ihren Service zum Austausch des Sitzes.

Lieferumfang

- Aluminiumrohrgestell mit Drehachse (bereits vormontiert)
- Auflagerahmen (rechts und links) und Auflagegummis
- Kunststoff Rückenlehne und Sitzfläche
- Arretierhebel mit Rückholfeder
- Werkzeug (Maul- und Inbusschlüssel)

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	120 kg
Leergewicht:	6,3 kg
Gesamtbreite:	700 – 840 mm
Gesamthöhe:	545 mm
Gesamttiefe:	570 mm
Sitzfläche:	400 x 400 mm
Wannenrand:	630 – 770 mm
Sitzhöhe über Badewannenrand:	40 mm
Verstellung:	Drehbar, 360° (4x90° arretierbar)

Stand: 08/2006/Rev.2

Gebrauchsanweisung

Badewannendrehstuhl Bano



Allgemeines

Für den hier beschriebenen Badewannendrehstuhl Bano ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Badewannendrehstuhl Bano ist ausschließlich für das Sitzen beim Waschen/Duschen in einer Badewanne konzipiert. Die Verwendung des „bano“ ist angezeigt bei funktioneller Störung der Rumpfbewegung/-haltung (z.B. neuromuskulärer Erkrankungen oder bei Gleichgewichtsstörungen) fehlender Funktionsfähigkeit der unteren und/oder oberen Extremitäten (z.B. bei Amputationen, Lähmungen, Gelenkerkrankungen, neuromuskulären Erkrankungen).


Bedienung

Der Drehstuhl wird auf die Badewannenränder aufgelegt. Vor dem Einsteigen drehen Sie die Sitzfläche in Einstiegsrichtung (durch das Betätigen des Arretierhebels). Dadurch wird das Hinsetzen/Einsteigen erleichtert. Nach dem Hinsetzen/Einsteigen betätigen Sie den Arretierhebel und drehen sich mit dem Sitz in die Wanne hinein. Nun können Sie selbstständig oder mit Hilfe einer Pflegeperson Waschen oder Duschen und wieder sicher durch die Drehfunktion aussteigen.

Drehsitz anpassen

Der Badewannendrehstuhl muss an die Wannenbreite angepasst werden.

- Lösen Sie die Schrauben (nicht vollständig herausdrehen)
- Setzen Sie den Sitz in die Badewanne und ziehen Sie beide Seiten des Auflagerrahmens soweit hinaus, dass die Auflagegummis vollständig auf dem Wannenrand aufliegen
- Achten Sie darauf, dass beide Seiten gleichermaßen herausgezogen sind
- Ziehen Sie die vier Schrauben wieder fest an

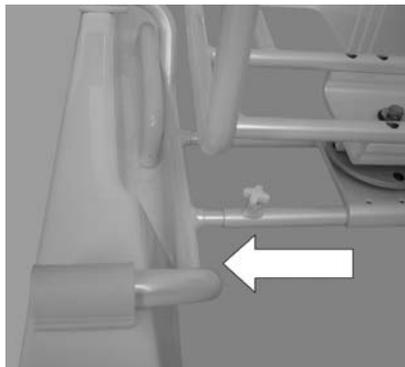


Rückenlehne

- Sollte die Rückenlehne noch nicht montiert sein, so schieben Sie sie in die Rückenlehnenrohre. Drücken Sie die Lehne in die Rohre fest ein. Durch die Passgenauigkeit wird ein fester Sitz erreicht.



Sitz

- Die Sitzfläche wird auf dem Rahmen durch einen kräftigen Druck eingerastet.
- Um die Sitzfläche zu lösen, halten Sie den Drehstuhl an der Armlehne fest und ziehen die Sitzfläche vom Gestell.

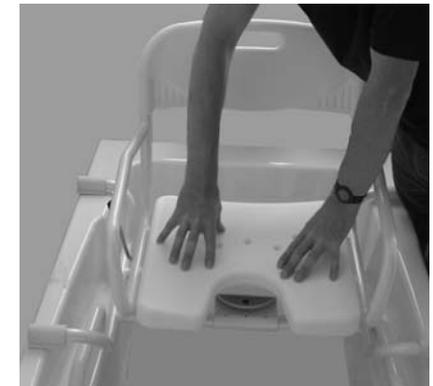

Sitz drehen

- Um den Sitz zu drehen drücken Sie den Arretierungshebel nach außen.
- Drehen Sie den Sitz nun in die gewünschte Richtung und lassen den Arretierungshebel wieder los.
- In 90° zur Ausgangsposition arretiert der Sitz selbsttätig ein.

