

Einstellen eines ROHO-Kissens

Schritt 1:

Drehventil öffnen und Kissen leicht überpumpen. Drehventil schliessen. Bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLORTM: Grüner Knopf vor dem Aufpumpen eindrücken (Luft gelangt in alle 4 Kammern).



Schritt 2:

PatientIn auf das Kissen setzen. Sicherstellen, dass

- PatientIn möglichst weit hinten im Stuhl sitzt
- Arm-, Fuss- und Rücken-Stützen richtig eingestellt sind
- PatientIn in gewohnter Ruhestellung sitzt

Schritt 3:

Hand unter das Sitzbein (Tuber Ischiadicum) schieben. Drehventil öffnen und Luft entweichen lassen, bis der Handrücken die Sitzfläche berührt. Drehventil schliessen. Verbleibender Abstand zwischen Sitzbein & Sitzfläche: ca. 1.5 – 2.5cm. Eine regelmässige Nachkontrolle mit der Hand ist empfohlen.



1.5 – 2.5cm



**Einsinken und IM Kissen sitzen
– aber: NICHT Durchsitzen**

Schritt 4 (nur bei 4-Kammer/SELECT-Kissen mit ISOFLORTM):

PatientIn nach Bedarf positionieren. Bei gewünschter Sitzposition roten Knopf eindrücken. Die Luft wird so in den einzelnen 4 Kammern eingeschlossen, wodurch eine stabile Position erreicht wird. Nachkontrolle mit der Hand für den optimalen Abstand zwischen Sitzbein und Sitzfläche (gem. Schritt 3). Allenfalls Nachpumpen mit eingedrücktem, grünen Knopf. Wenn beendet, roten Knopf wieder eindrücken.

