

**Attends**<sup>®</sup> Adjustable



Neu von Attends: Das Inkontinenzprodukt mit der individuellen Passform. Mit elastischem Hüftband. Für noch mehr Sicherheit.




Jetzt gibt es von Attends ein Produkt, das sich jeder Körperform bestmöglich anpasst

Im Gegensatz zu herkömmlichen Inkontinenzprodukten können Attends Adjustable auf unterschiedliche Weise angelegt werden – je nach Pflegesituation. In jedem Fall sitzen Attends Adjustable körpernah und schützen zuverlässig.

Das Geheimnis? Neu entwickelte elastische Materialien und ein diskreter Schnitt

Dank des weichen, elastischen Hüftbandes schmiegen sich Attends Adjustable an den Körper an und sitzen hautnah und diskret. Der zuverlässige Klettverschluss kann bei Bedarf wieder geöffnet und das Produkt kann enger oder lockerer angelegt werden.

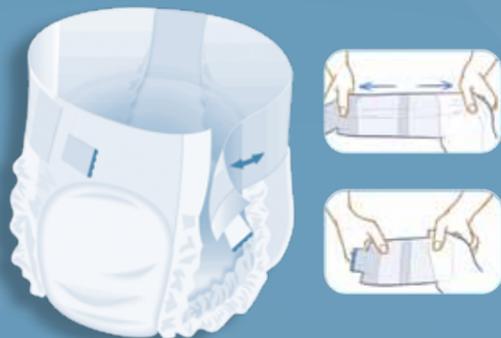

### Anlegemöglichkeiten

Attends Adjustable können auf unterschiedliche Art und Weise angelegt werden. Alle drei Anlegemöglichkeiten funktionieren jeweils im Sitzen, im Stehen oder im Liegen. Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden: Attends Adjustable können individuell den Körperformen angepasst werden – dank des elastischen Hüftbandes und den wieder verschließbaren Klettverschlüssen.


1. Falten Sie das Produkt auf und formen Sie den aufsaugenden Teil in Längsrichtung zu einem "Schiffchen".




2. Führen Sie das offene Produkt zwischen den Beinen durch. Legen Sie das Produkt am Gesäß und am Bauch an und schließen Sie die Klettstreifen.



3. Schließen Sie auf einer Seite den Klettverschluss, bevor Sie das Produkt anlegen. Schlüpfen Sie mit einem Bein durch den Beinausschnitt. Legen Sie das Produkt nun vollständig an und schließen Sie den zweiten Klettverschluss. Stellen Sie die Klettverschlüsse nochmals nach.

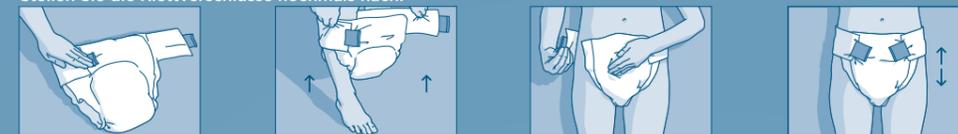

4. Schließen Sie auf beiden Seiten locker die Klettverschlüsse, bevor Sie das Produkt anlegen. Schlüpfen Sie nun mit beiden Beinen in das Produkt und ziehen Sie es hoch. Stellen Sie die Klettverschlüsse nochmals nach.

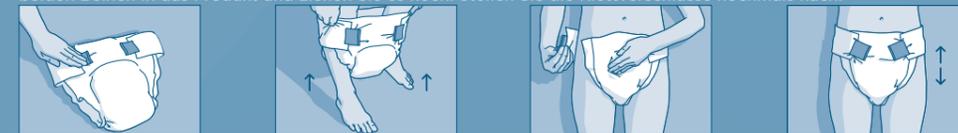

Die Klettverschlüsse können bei Bedarf wieder geöffnet und verschlossen werden.

Eine Vielzahl von professionellen Pflegekräften in ganz Europa und Kanada haben Attends Adjustable im Pflegealltag getestet ...

Mehr als 120 Patienten und mehr als 60 Pflegekräfte in Europa und Kanada haben Attends Adjustable im Zeitraum von September 2011 bis März 2012 getestet und bewertet.

... und mit uns über ihre Erfahrungen gesprochen.

“Es ist super-einfach anzulegen – selbst im Sitzen. Dazu lege ich das Produkt zunächst an einem Bein an, bevor ich es hochziehe und verschließe.”

“Meine Patienten waren sehr angetan, das Produkt sei so weich und angenehm auf der Haut.”

“Das Produkt ist wirklich auch für schwierige Anlegesituationen geeignet – dank der elastischen Flügel.”

“Während der Nacht kann ich ganz einfach prüfen, ob das Produkt gewechselt werden muss. Ich öffne die Klettverschlüsse, schaue nach und verschließe sie wieder.”

“Ich habe schon viel ausprobiert in meinen 38 Jahren Berufstätigkeit, aber Attends Adjustable gefallen mir am besten. Die funktionieren wirklich prima.”

... doch dieses Schreiben eines Anwenders bringt es auf den Punkt:

Er hatte sich bereit erklärt, Attends Adjustable zu testen.

“Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Blasenfunktion. Deshalb bin ich Tag und Nacht auf ein Inkontinenzprodukt angewiesen. Ein gutes Produkt zu haben bedeutet für mich Lebensqualität.

Mein bisheriges Produkt funktionierte prima und ließ mir genug Bewegungsfreiheit, solange es trocken war. Aber sobald es eingenässt war, hing das Saugkissen schnell durch, was sehr unangenehm war. Weil das Produkt dann nicht mehr richtig saß, musste ich es wechseln, und habe auf diese Weise ziemlich viele Produkte verbraucht.

Die Attends Adjustable haben mich dann sehr positiv überrascht: Die ganzen Probleme, die ich mit meinen bisherigen Produkten hatte, hatte ich mit Attends nicht.

Die Art, wie das Produkt angezogen wird und wie es auch während des Tragens bei Bedarf wieder hochgezogen werden kann – das ist sehr komfortabel. So sitzt es immer körpernah und reibt nicht.

Aber das Wichtigste ist, dass Attends Adjustable so zuverlässig sind. Hier ist das Produkt wirklich spitze. Deshalb würde ich es unbedingt empfehlen und meinem bisherigen vorziehen.”

# Attends® Adjustable

**Trockenheit, auf die Sie sich verlassen können.**

**Schweiz:**

Attends GmbH  
Baslerstrasse 15  
CH-4310 Rheinfelden

Bestell- und Lieferservice  
Lohmann & Rauscher AG  
Badstrasse 43 9230 Flawil

**Fachberatung**

Tel: 061 833 30 90  
Fax: 061 833 30 99  
beratung@attends.ch

**Bestellungen**

Tel: 0844 844 410  
Fax: 0844 844 430  
info@ch.LRMed.com

[www.attends.ch](http://www.attends.ch)

	Bauch-/ Hüftumfang cm	Stückzahl Packung/ Karton	EAN Packung/ Karton *7332152	PZN (DE) Packung/ Karton	Pharmacode (CH) MiGeL-Nr. (CH)	Hilfsmittel- Positions-Nr.
<b>Attends Adjustable 10 Medium</b>	80-110	28/4x28	*206249/ *206256	9240137/ 9240243	5260533 15.01.03.00.1	15.25.03.1364
<b>Attends Adjustable 10 Large</b>	110-140	28/4x28	*206263/ *206270	9240266/ 9240272	5260556 15.01.03.00.1	15.25.03.2438

Auch Attends Adjustable verfügen über den zweifachen Saugkern mit der Quick-Dry Technologie. Der Urin wird schnell aufgenommen und sicher im Innern des Produktes eingeschlossen. Die "Active Zone" im Schrittbereich sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit, dort wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Hauttrockenheit, vorbildlichen Auslaufschutz und einen hautgesunden pH-Wert. Atmungsaktive Materialien sorgen für noch mehr Tragekomfort. Odour Protection lässt unangenehme Gerüche gar nicht erst entstehen.



Natürliche  
Geruchs-  
bindung



Active  
Zone



Atmungs-  
aktiv



pH-Wert



Quick-Dry