



Jetzt auch mit Anleitungsfilm!

Anpassung und Maße der Heelift® Fersen-Freilagerung

Einfaches Anlegen (gilt für alle Modelle)



Platzieren Sie den Fuß so, dass die Ferse direkt über der Aussparung liegt.




Schließen Sie die Klettverschlüsse nicht zu fest. Sie sollten die Haut nicht berühren.



Prüfen Sie die Passform. Die Verschlussbänder sollten locker anliegen.



Zwischen der Fersenöffnung und dem Bett sollte ein Finger Platz haben.

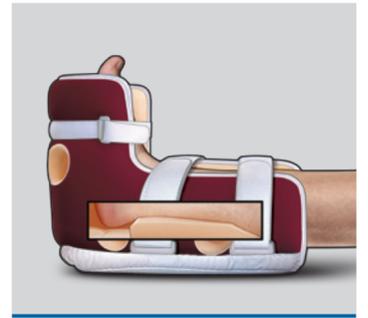

Fertige Anlage. (Alle 6 – 8 Stunden sollte der Heelift® abgenommen und das Bein und der Fuß auf Hautveränderungen untersucht werden.)

Individuelles Anpassen (gilt für alle Modelle)



Fuß- und Hüftrotation: Befestigen Sie das Zusatzpolster an der jeweiligen Position.




Kompressionstherapie: Den Schlauch einer Kompression können Sie durch die Öffnung führen.



Fallfuß: Befestigen Sie das Zusatzpolster senkrecht hinter der Fußsohle.



Achillessehne: Schneiden Sie eine V-förmige Aussparung in das Schaumstoffpolster.

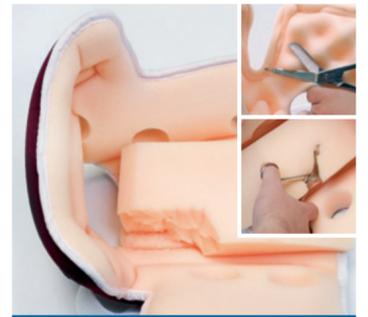

Malleolar Dekubitus: Entfernen Sie eventuelle Noppen oder Teile des fixen Schaumstoffpolsters.

Waschanleitung

Handwäsche: Mildes Waschmittel und warmes Wasser.
Maschinenwäsche und Trocknung: Klettbänder schließen, im Wäschebeutel waschen und trocknen. Verwenden Sie keine Bleichmittel.
Desinfizierung nach dem Waschen: Mit antiseptischem Spray desinfizieren.
Sterilisierung: Vorschriftsmäßige Benutzung eines Dampfautoklaven. Mindestens zwei Stunden abkühlen und trocknen lassen.
Material: Latexfreier Polyurethanschaumstoff.

Empfohlen für nur einen Patienten.

Größen

Größe	Petite	Normal	Bariatric
Körpergewicht kg	32 – 59	54 – 113	100 – 272
Wadenumfang cm	15 – 25	20 – 36	30 – 58
Heelift® Smooth Standard	✓	✓	✓
Heelift® Glide Smooth Standard	✓	✓	✓
Heelift® AFO Smooth Standard		✓	✓

Material

Standard
 Genoppter Schaumstoff für bessere Luftzirkulation

Smooth
 Glatter Schaumstoff bei empfindlicher Haut

Weitere Produktinformationen und die Gebrauchsanweisung finden Sie auf: www.darco.de

Heelift®

Heelift® Glide

Heelift® AFO

