

## Drive-in Ramp

### Montageanleitung Nr. 16

- Vielen Dank, dass Sie ein FEAL-Produkt gekauft haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Rampe während des Transports nicht beschädigt wurde.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Rampe benutzen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für spätere Zwecke auf.
- Auf jeder Rampe befindet sich ein Aufkleber, der das maximale Gewicht der Rampe angibt.

**Seien Sie vorsichtig und benutzen Sie die Rampe mit Bedacht. Wichtig ist, dass die Rampe auf einem festen Untergrund steht.**

- Die Höhe der Rampe kann mit den mitgelieferten Stellfüßen eingestellt werden (Bild A).
- Beachten Sie die unterschiedlichen Größen der Verstärkungswinkel (Bild B).
- Wenn die verstellbaren Füße mit einer Mutter auf der Innenseite und einer auf der Aussenseite befestigt werden, sollte der kleinere Verstärkungsbügel innen und der grössere aussen liegen (Bild C).
- Sollte ein Schaden an der Rampe auftreten, darf sie nicht benutzt werden, bis sie von einer fachkundigen Person repariert wurde. Die Ersatzteile sind in einer separaten Ersatzteilliste aufgeführt.

## Pflege und Unterhalt

- Bei korrektem Einbau der Bolzen ist normalerweise keine Wartung oder Reinigung erforderlich.

## Demontage und Recycling

- Das gesamte Ausgangsmaterial ist zu 100 % recycelbar. Aluminium wird als Metallschrott zurückgelassen.



Bild A



Bild B



Bild C

